

## 「充電ケーブル用コネクタ」「充電ケーブル」使用上のご注意

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品をご愛顧いただき厚く御礼を申し上げます。

「リリアムスポット」および「リリアムスポット 2」において、充電できないなどの故障が確認されました。調査した結果、誤った使用により本体上部の「充電ケーブル用コネクタ」（差し込み部分）や「充電ケーブル」のコネクタが故障する場合がありますことが判明いたしました。つきましては、下記、安全上のご注意に従い正しくご使用いただきますようお願い申し上げます。

なお、修理依頼またはご不明な点がございましたら、リリアム大塚サポートセンターまでご連絡ください。

リリアム大塚サポートセンター フリーダイヤル 0120-543-563  
受付時間 9:30～17:00（土日祝および年末年始は除く）

謹白


### 記

#### 安全上のご注意

次の点を守ってください。コネクタが破損し、発熱、発火するおそれがあります。

- ・超音波ジェルはプローブ部以外には塗らない
- ・本体上部の充電ケーブル用コネクタや、充電ケーブルのコネクタに、超音波ジェルや液体、異物が入らないように注意する
- ・コネクタは正しい向きで、まっすぐ挿入する
- ・コネクタが一度曲がった充電ケーブルは使用しない（曲がったコネクタを手で直さない）

なお、本体上部の充電ケーブル用コネクタやスピーカーの面に誤ってジェルを塗ることを防ぐ「注意喚起シール」を同封しております。お手数ですが、下記図を参考に貼付していただきますようお願い申し上げます。

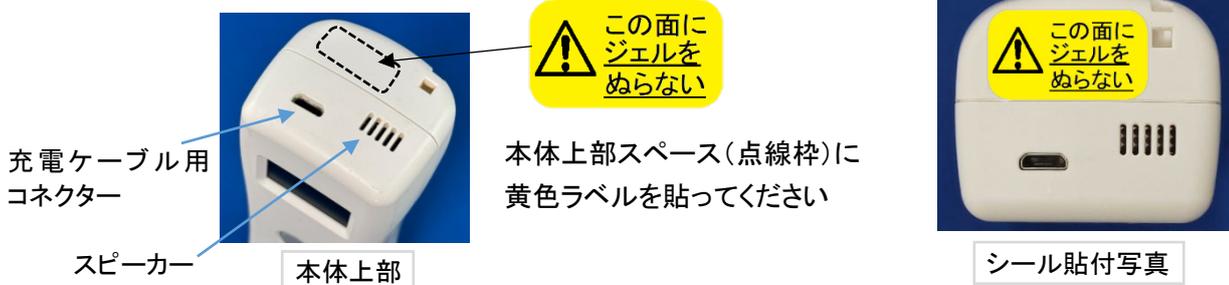

#### 誤って超音波ジェルを塗布してしまったときは

万が一、本体上部の充電ケーブル用コネクタやスピーカーに、誤って超音波ジェルを塗布した場合は、直ちに使用を中止し、修理をご依頼ください。

以上

# 使用上のご注意



ジェルはプローブ部に塗ってください

△使用しないでください

修理をご依頼ください



正しい向きで、まっすぐ挿入



コネクターが曲がったケーブルは使用しない



斜めに挿入、逆刺しはしない