

## 「充電ケーブル用コネクタ」/「充電ケーブル」使用上のご注意

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、「リリアムスポット」および「リリアムスポット 2」において、充電ができない等の不具合が確認されました。調査の結果、誤った使用方法により、本体上部の「充電ケーブル用コネクタ（差し込み部）」や「充電ケーブル」側のコネクタが故障する場合がありますことが判明いたしました。

これを受けまして、「充電ケーブル用コネクタ（差し込み部）」に、下図のとおり専用カバーを取り付ける対策を実施することいたしました。

つきましては、別添の「充電ケーブル用コネクタカバー」取付手順書に従って、カバーの取付をお願いいたします。また、弊社ホームページにて取付手順の動画をご覧いただくことも可能です。なお、カバーは機器1台につき予備を1個同梱しております。

今後とも、安全上のご注意に従い、正しくご使用いただきますようお願い申し上げます。

なお、修理のご依頼、またはご不明な点がございましたら、リリアム大塚サポートセンターまでご連絡くださいますようお願いいたします。

謹白

### 記


#### <安全上のご注意>

次の点をお守りください。誤った使用によりコネクタが破損し、発熱や発火に至るおそれがあります。

- ・ 超音波ジェルは、プローブ部以外には塗布しないでください。
- ・ 本体上部の「充電ケーブル用コネクタ」や「充電ケーブル」側のコネクタに、超音波ジェル、液体、異物が付着または侵入しないようご注意ください。
- ・ コネクタは正しい向きを確認し、まっすぐ挿入してください。
- ・ コネクタが一度でも曲がった充電ケーブルは使用しないでください。また、曲がったコネクタを手で修正しないでください。

#### <誤って超音波ジェルを塗布してしまったときは>

万が一、本体上部の充電ケーブル用コネクタまたはスピーカー部に、誤って超音波ジェルを塗布した場合は、直ちに使用を中止し、修理をご依頼ください。

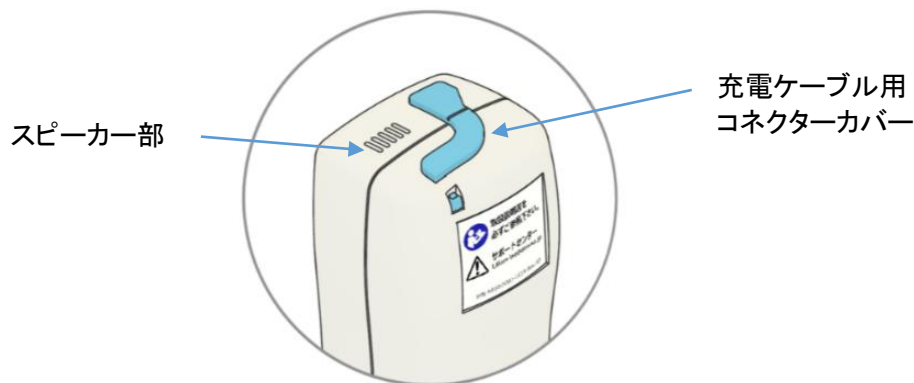

【お問い合わせ先】 リリアム大塚サポートセンター フリーダイヤル 0120-543-563

※受付時間 9:30~17:00(土日祝および年末年始は除く)以上

# 使用上のご注意



ジェルはプローブ部に塗ってください



誤ってジェルを本体上部に塗ってしまったら!!

△使用しないでください

修理をご依頼ください



正しい向きで、まっすぐ挿入



コネクターが曲がったケーブルは使用しない



斜めに挿入、逆挿しはしない