

リリアムワン[®]

測定時の注意点



注意点 ① 持ち方 くぼみの部分に指を置くようにしてください。

良い例



測定時はくぼみの部分に指を置くようにしてください

悪い例



くぼみの部分に指を置いていない

注意点 ② 角度 正中線上で本体を傾けずに測定してください。

良い例



本体がベッドと垂直になるくらいを目安に、本体を立てて保持してください
画面を見ながら測定する必要はありません

悪い例



本体が傾いている

注意点 ③ 押し圧 本体は押し付けず手で支える程度に保持してください。

良い例



悪い例



本体を押し付けている